



Instructies voor het verzamelen van stoelgang voor de iFOBT

BELANGRIJK

- A.** De buis bij 2-30 °C bewaren, buiten bereik van kinderen.
- B.** De vloeistof niet innemen en contact met huid, slijmvliezen en ogen vermijden.
- C.** De buis niet in de anus stoppen.
- D.** Stoelgang verontreinigd met vaginaal bloed, bloed van aambeien of urine niet verzamelen.
- E.** De buis slechts éénmaal gebruiken voor één ontlasting.
- F.** De stoelgang mag niet in aanraking komen met het water in het toilet.
- G.** Voer onmiddellijk na ontlasting de monstername uit zoals hiernaast beschreven.



Waarschuwing


Verwijder nooit de witte dop!

Gebruik de buis niet als de verzegeling van de witte dop beschadigd is.

1. Vang uw stoelgang op op droog toiletpapier.



2. Draai de groene stop los.

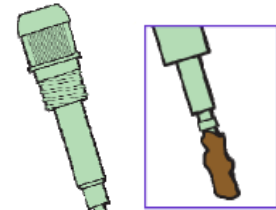

3. Duw het gegroefde gedeelte van de stick op 4 verschillende plaatsen in de stoelgang zoals hiernaast aangegeven. De groeven van de stick dienen volledig bedekt te zijn met stoelgang.



4. Plaats de groene schroefdop met de stick terug op de buis en draai de dop dicht. Hierna niet meer openen!

5. Kleef de afneembare helft van het barcode-etiket (aanwezig op de buis) hieronder op het aanvraagformulier in het voorziene vakje.



6. Bewaar de buis in de plastic zak in de koelkast buiten invloed van licht. Bezorg de buis zo snel mogelijk aan uw arts. Het monster dient binnen de 5 dagen in het laboratorium toe te komen.



Aanvraagformulier voor iFOBT (indien geen ander beschikbaar)

Vak bestemd voor de patiënt:

Kleef hier het afneembaar barcode-etiket:

Noteer datum afname:

Vak bestemd voor de arts:
Dokter (stempel):

AANVRAAGFORMULIER iFOBT

vraagt een immunologische "occult bloed" test (iFOBT) op stoelgang aan

voor patiënt:

M / V Geb. dat.:

Adres:

VIGNET

Mutualiteit:

CG1:

CG2:

Rijksregisternummer:

Handtekening: