



## Afname-instructies speeksel voor mazelendiagnostiek

### Materialiaal

- Sponzen speekselwiser Oracol Saliva Collection System. Gebruik geen andere wissers. Via het laboratorium te verkrijgen bij het WIV. Beperkte voorraad aanwezig.
- Verpakt in plastic zakje met instructies en speciaal aanvraagformulier

### Staalname tijdstip & interferentie

- Niet meteen na het drinken noch na het poetsen van de tanden of na het roken.

### Methode

- De sponzen wiser wordt op dezelfde manier gebruikt als een tandenborstel. De speekselafname is volstrekt pijnloos.
- Open de plastic verpakking rond de wiser en haal de wiser uit het plastic buisje. Steek de wiser in de mond en wrijf, net zoals met een tandenborstel, het sponzen gedeelte over het tandvlees aan de basis van de tanden (indien deze aanwezig zijn) tot de wiser vochtig is. Dit neemt ongeveer **1 tot 2 minuten** in beslag.
- Plaats de vochtige wiser terug in het plastic buisje en sluit het geheel af.
- Stalen in de koelkast bewaren tot verzending.
- Speciaal aanvraagformulier "Mazelendiagnostiek" moet volledig ingevuld worden, zo niet worden de analyses (door het WIV) aan de patiënt gefactureerd.

AI-Mazelen v1 20111017.docx