


Cervixcytologie “monolayer” afname

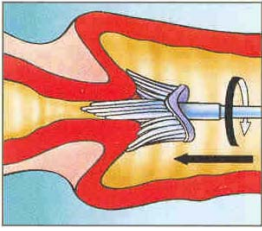

Met de Cervex[®] borstel materiaal afnemen t.h.v. de cervix zoals geïllustreerd op de tekening hiernaast. Ervoor zorgen dat de centrale haren van de borstel diep genoeg in het endocervicaal kanaal worden ingebracht zodat de korte, buitenste haren volledig in contact komen met de ectocervix. De borstel zachtjes aandrukken en **5 maal in wijzerzin** roteren.



De borstel spoelen in het potje met PreservCyt[®] solution door het **10 keer** tot op de bodem te duwen, zodat de haren uit elkaar gaan. Tenslotte **krachtig draaien** met de borstel om achtergebleven staal los te maken. De **borstel verwijderen**, niet achterlaten in het medium.